



INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZATOR

Compoziție calitativă și cantitativă:

Un ovul conține: subgalat de bismut – 100 mg, collagen vegetal – 15 mg, extract de cimbru (*Thymus vulgaris*) – 10 mg, extract de goldenseal (*Hydrastis canadensis*) – 10 mg, extract de gălbenele (*Calendula officinalis*) – 10 mg, extract de turmeric (*Curcuma longa*) – 10 mg, hexylresorcinol – 2 mg, gliceride semisintetice, lanolină anhidră, dioxid de siliciu coloidal.

Aspectul dispozitivului:

Ovule omogene, galbene până la galben închis, fără particule aglomerate sau bule de aer. Fiecare cutie conține 2 blistere cu câte 5 ovule. Greutatea unui ovul este de 2 g.

Utilizatorii dispozitivului:

Cerviron este indicat femeilor adulte (inclusiv femeilor aflate la menopauză).

La ce este utilizat:

Cerviron este indicat pentru tratamentul:

- vulvovaginitei acute și cronice de etiologie atrofică, aerobă, traumatică și infecțioasă,
- eroziunilor de col uterin,
- sângerărilor vaginale de origine traumatică,
- perturbărilor pH-ului vaginal și a florei vaginale normale.

Poate fi utilizat și pentru recuperarea postoperatorie după intervenții chirurgicale ginecologice și ca adjuvant în tratamentul cu antibiotice sau antifungice.

Indicații:

Cerviron este un dispozitiv medical destinat utilizării în tratamentul vulvovaginitei acute și cronice de etiologie atrofică, aerobă, traumatică și infecțioasă, a eroziunilor de col uterin de origine traumatică sau infecțioasă și a sângerărilor produse de acestea, în recuperarea postoperatorie după intervenții chirurgicale ginecologice, pentru restabilirea pH-ului și florei vaginale normale, precum și ca adjuvant în tratamentul cu antibiotice sau antifungice.

Cerviron este indicat pentru tratamentul următoarelor simptome:

- prurit vulvo-vaginal,
- senzații de arsură la nivelul mucoasei vaginale,
- eritem vulvo-vaginal,
- leucoree patologică,
- dispareunie,
- disurie,
- sângerări vaginale asociate eroziunilor colului uterin.

Cerviron poate fi utilizat singur sau în combinație cu un tratament medicamentos specific pentru afecțiunile ginecologice.

Contraindicații:

Nu utilizați Cerviron în caz de hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului.

Sarcina și alăptarea

Din cauza absenței datelor clinice suficiente, nu este recomandată administrarea ovulelor Cerviron femeilor însărcinate. Este recomandat să consultați medicul în acest caz. Nu trebuie luate măsuri de precauție atunci când este utilizat în timpul alăptării.

Efecte asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje

Niciuna dintre componentele produsului nu afectează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Interacțiuni cu alte produse:

Interacțiunile cu alte produse nu sunt cunoscute, din această cauză se recomandă consultarea medicului înainte de a utiliza Cerviron împreună cu alte dispozitive medicale sau medicamente de uz vaginal.

Doze și mod de administrare:

Se administrează un ovul intravaginal, de preferință seara înainte de culcare sau conform prescripției medicale.

Desprindeți o alveolă din blister prin ruperea de-a lungul liniei perforate, apoi deschideți alveola trăgând încet cele două straturi de la capăt, unde nu sunt sigilate împreună. Împingeți de la celălalt capăt pentru a scoate ovulul.

Este de preferat să introduceți ovulul stând în poziția culcat.

Introduceți ovulul cât mai adânc posibil în vagin.

Utilizarea ovulelor începe în prima zi după menstruație. Durata de administrare este de 10 sau 15 zile pe lună, sau conform indicațiilor medicului. Efectele pot apărea după prima lună de tratament. Utilizarea se poate repeta câteva luni până la vindecare, sau pentru a consolida și menține efectele favorabile obținute.

Atenționări și precauții speciale pentru utilizare:

- Datorită compoziției produsului, în general nu sunt necesare precauții.
- Igienizați-vă bine mâinile și zona intimă înainte de a administra ovulul.
- Nu utilizați ovule cu alveole deteriorate sau cu urme de substanță pe exteriorul alveolelor.
- Nu folosiți ovule cu aspect neuniform sau care prezintă urme de particule aglomerate.
- Nu divizați ovulele.
- A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.
- Produsul este destinat utilizării vaginale. A nu se înghiți.
- Evitați contactul produsului cu ochii.
- Nu utilizați produsul după data de expirare indicată pe ambalaj și blister.
- Utilizarea dispozitivului medical poate afecta eficacitatea prezervativelor și a diaframelor din latex.
- Informați-vă medicul dacă plănuți să rămâneți însărcinată.
- Informați producătorul sau autoritățile competente cu privire la orice incident serios legat de utilizarea dispozitivului medical Cerviron.

Efecte secundare:

Utilizarea produselor topice pentru o perioadă lungă de timp poate provoca iritații locale și/sau sensibilizare. Dacă apar reacții adverse, întrerupeți imediat tratamentul și contactați medicul sau farmacistul.

Orice incident serios care a avut loc în legătură cu dispozitivul medical trebuie raportat producătorului și autorității competente a statului membru în care este stabilit pacientul.

Supradozaj:

Nu se cunosc cazuri de supradozaj. Substanțele conținute nu se absorb sistemic, se elimină în mod natural în maxim 24 de ore de la administrare.

Expirare, depozitare și eliminare:

A se păstra la temperaturi cuprinse între 2 – 25 °C în ambalajul original, protejat de lumina directă a soarelui. Termenul de valabilitate înscris pe ambalaj se referă la produsul depozitat în condițiile prevăzute de producător. Dispozitivul medical nu trebuie aruncat pe calea apei reziduale sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați dispozitivele medicale pe care nu le mai folosiți.

Producător:

Perfect Care Manufacturing S.R.L.

Strada Complexului nr. 82,
085200 Mihăilești,
jud. Giurgiu, România.
<https://www.perfectcare.ro>
contact@perfectcare.ro

Ediția 03 Revizia 01

Data emiterii: 16.06.2025

